




## CONSEJOS para girar a un paciente con el sistema Face Cradle de posicionamiento en prono.

*El sistema Face-Cradle está indicado para cirugías en las que se necesita colocar al paciente en prono, lo que ofrece a los clínicos mayor visibilidad del rostro del paciente.*




Mientras el paciente está en posición supina, coloque la base de Face Cradle, con cojines, sobre el rostro del paciente y asegúrese de que las cejas estén visibles y que el tubo endotraqueal no esté plegado. Tenga en cuenta la profundidad del tubo endotraqueal antes de girar al paciente. Sujete el Face Cradle con el conjunto de cojines firmemente sobre el rostro durante la posición de "giro a prono".

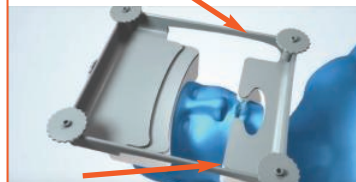

Los clínicos pueden sostener el bastidor del Face Cradle usando los lados como manijas, cuando giren al paciente.



Después de girar el paciente a la posición en prono, vuelva a corroborar la profundidad del tubo endotraqueal y deslice el espejo debajo, colocando las patas de la base del Face Cradle en los insertos del espejo.

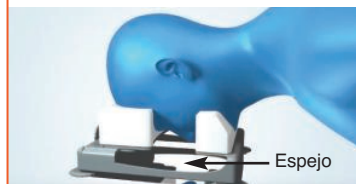

Vuelva a ajustar la espuma y las patas para ajustarlas al paciente y lograr una alineación espinal neutra. Cuando sea necesario, acomode el cuerpo del paciente para mantener una posición neutral del cuello. Ajuste las patas del Face Cradle para que la base quede nivelada. Conecte el circuito de anestesia al tubo endotraqueal.

Una vez en posición, vuelva a revisar que el rostro y los cojines estén correctamente ajustados y asegúrese de que el rostro y los ojos estén dentro de la abertura del conjunto de cojines y que haya suficiente espacio entre la nariz y el espejo. El tubo endotraqueal u otros dispositivos no deben estar plegados ni obstruir la vista de los ojos. **Vuelva a revisar los ojos, la nariz y el cuello con frecuencia para asegurarse de que estén en la posición adecuada.**

### **Advertencias importantes:**

1. Si no se mantiene el cuello en una posición neutra, se pueden producir daños en el cuello y/o abrasiones en el mentón.
2. Para reducir la probabilidad de abrasiones o úlceras por presión en la piel, revise el rostro del paciente con frecuencia y vuelva a posicionar periódicamente la cabeza según lo indique el manual o las pautas de su departamento en cuanto a la frecuencia de reposicionamiento sugerida. Las pautas clínicas estándar sugieren hacerlo cada dos horas.\*

**“Cuando la visión es importante. . . usted tiene el control”.**

\*Prácticas Recomendadas y Estándares Perioperatorios, Denver, CO: Aorn, Inc: 2008: 497 - 520.

**Mercury Medical®**  
Su necesidad . . . Nuestra innovación

Patentes estadounidenses: US 8,549,683, B2; US D690,016 S

www.mercurymed.com