

**Deluxe kompletna maska za lice**

Za upotrebu na jednom pacijentu

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:**

Deluxe kompletna maska za lice je predviđena za usmeranje gasa u gornje disajne puteve.

**MERE OPREZA:**

1. Tokom upotrebe ove maske stanje pacijenta se mora neprekidno pratiti.
2. Masku treba koristiti samo sa CPAP, sa uređajima za neinvazivnu ventilaciju ili prema preporuci nadležnog lekara.

**UPUTSTVA ZA UPOTREBU:**

1. Povežite masku pomoću odgovarajućeg spoja.
2. Postavite masku na pacijenta.
3. Pomoću brzih kopči povežite trake za glavu sa maskom.
4. Podesite trake za glavu sa kukicama i omčama i položaj jastučića za čelo od pene tako da pravilno odgovaraju pacijentu.
5. Izvršite kontrolu svih priključaka i spojeva kako biste osigurali čvrste veze.
6. Odložite masku u skladu sa protokolom Vaše ustanove.


**UPOZORENJA:**

- Federalni zakon (SAD) ograničava prodaju ove maske od strane ili po nalogu lekara. (Samo na recept, Rx ONLY.)
- Ova maska nema integrisani port za curenje; stoga, ako je potrebno, poseban ekshalacioni uređaj mora biti deo kruga. Koristite ekshalacioni port koji preporučuje proizvođač opreme.
- Ako maska uzrokuje iritaciju kože pacijenta konsultujte lekara.
- Ova maska nije podesna za mehaničku ventilaciju za održavanje života.
- Svaki ozbiljan incident koji se eventualno dogodio treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države u kojoj je korisnik i/ili pacijent registrovan.
- Nemojte čistiti, uranjati, ispirati niti sterilisati ovu masku, jer to može dovesti do štetnih ostataka na maski ili negativno uticati na nju.
- Ponovna upotreba ovog uređaja može predstavljati opasnost od unakrsne kontaminacije i uređaj možda neće raditi kako je predviđeno.
- Ova maska nije provodljiva i ne treba je koristiti u prisustvu zapaljivih anestetika.

**SPECIFIKACIJE:**MR uslovi: Statičko magnetno polje od 3,0 Tesla ili manje  
Prostorni gradijent od 720 gauss/cm ili manje

MERCURY MEDICAL® Deluxe maska je projektovana tako da zadovoljava zahteve standarda ISO 5356-1.


Veličina porta: 22 mm I.D. (Unutrašnji prečnik)

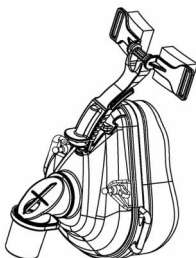

Port koji se rotira  
za 90° i ventil  
protiv asfiksije



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

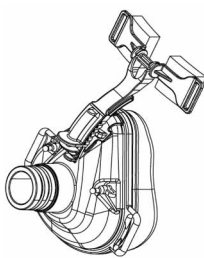

Pravi rotirajući port



Medicinski uređaj



Za jednog  
pacijenta više  
puta



Nije proizvod.  
lateksa prirod.  
gume



Nije sterilno



Bez ftalata



Samo na recept



MR uslovno